

CURAPAX®

BRUGSANVISNING



Læs altid brugsanvisning før brug



Fyld puden op med vand



Vend puden og ryst den lidt



Varm i mikrobølgeovn



Ved rød indikator er puden for varm

VARMEPUDE:

1. Fyld puden helt op med koldt/lunkent vand
2. Vend puden på hovedet, så ventilen "låser". Fjern det overskydende vand i påfyldningsstudsens.
3. Opvarm puden i mikrobølgeovn eller varmeskab indtil den ønskede temperatur opnås
4. Varmepuden er klar til brug. Klem evt. lidt på puden og fordel den varme gel.

KULDEPUDE:

1. Fyld puden helt op med koldt vand eller isvand.
2. Vend puden på hovedet, så ventilen "låser". Fjern det overskydende vand i påfyldningsstudsens.
3. Køl puden i køleskab indtil den ønskede temperatur er opnået
4. Kuldepuden er klar til brug. Klem evt. lidt på puden og fordel den kolde gel.

INSTANT VARMEPUDE:

1. Fyld puden helt op med varmt vand, der har den ønskede temperatur.
2. Vend puden på hovedet, så ventilen "låser". Fjern det overskydende vand i påfyldningsstudsens.
3. Varmepuden er klar til brug. Klem evt. lidt på puden og fordel den varme gel.

INSTANT KULDEPUDE:

1. Fyld puden helt op med koldt vand eller isvand.
2. Vend puden på hovedet, så ventilen "låser". Fjern det overskydende vand i påfyldningsstudsens.
3. Kuldepuden er klar til brug. Klem evt. lidt på puden og fordel den kolde gel.

ADVARSEL:

Hvis påfyldningsstudsens ikke blev helt tomt, kan der løbe lidt varmt vand/gel ud. CURAPAX bør kun opvarmes i mikrobølgeovn eller varmeskab. CURAPAX bliver ødelagt eller kan bryde ved overophedning. Tag derfor pudens forsigtigt ud af mikrobølgeovnen. Puden kan efter opvarmning være varmere, end den umiddelbart føles. Varmeindikatoren bliver rød, når temperaturen når ca. 45 grader Celsius, og der derved er stærkt forhøjet risiko ved at anvende produktet. Varmeindikatoren er udelukkende en ekstra, vejledende sikkerhedsforanstaltning mod skadevoldende anvendelse. Puden og gelen kan være for varm til den ønskede brug, også selv om indikatoren ikke er rød/virker. Mærk altid efter og brug Deres sunde fornuft.

En for varm eller for kold pude kan forårsage skader på huden og det underliggende væv. Til diabetikere og personer med dårligt blodomløb bør varmebehandling kun ske efter en læges anvisning. Vær opmærksom på, at huden hos børn, ældre og gravide kan være særlig følsom. Vær især påpasselig ved patienter med nedsat følsomhed.

ANBEFALING:

Hver mikrobølgeovn yder forskelligt. Opvarm derfor CURAPAX i intervaller af eksempelvis 20 sekunder og få derved en mere præcis, individuel fornemmelse for, hvornår produktet opnår den ønskede temperatur i netop Deres mikrobølgeovn.