

CURAPAX®

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Zawsze zapoznaj się z instrukcją przed zastosowaniem



Napetnij okład wodą



Obróć opakowanie do góry nogami i wymieszaj dokładnie



Podgrzewaj w kuchence mikrofalowej



Jeżeli wskaźnik jest w kolorze czerwonym okład może być zbyt ciepły do zastosowania.

OKŁAD NA CIEPŁO:

1. Napetnij opakowanie zimną / letnią wodą.
2. Obróć opakowanie do góry nogami aby zawór się uszczelnił. Usuń nadmiar wody który mógł pozostać przy zaworze.
3. Pogrzej opakowanie w kuchence mikrofalowej lub inkubatorze aż osiągnie pożądaną temperaturę.
4. Okład jest gotowy do użycia. Zaleca się lekkie rozmasowanie powierzchni opakowania w celu równomiernego rozłożenia się ciepła.

OKŁAD NA ZIMNO:

1. Napetnij opakowanie do pełna zimną/lodową wodą.
2. Obróć opakowanie do góry nogami aby zawór się uszczelnił. Usuń nadmiar wody który mógł pozostać przy zaworze.
3. Zchłódź okład w zamrażalniku (1 do 2 godzin) aż uzyska pożądaną temperaturę.
4. Okład na zimno jest gotowy do użycia. Zaleca się lekkie rozmasowanie powierzchni opakowania w celu równomiernego rozłożenia się temperatury.

BŁYSKAWICZNY OKŁAD NA CIEPŁO:

1. Napetnij opakowanie do pełna ciepłą wodą o pożądaną temperaturę.
2. Obróć opakowanie do góry nogami aby zawór się uszczelnił. Usuń nadmiar wody który mógł pozostać przy zaworze.
3. Okład jest gotowy do użycia. Zaleca się lekkie rozmasowanie powierzchni opakowania w celu równomiernego rozłożenia się ciepła.

BŁYSKAWICZNY OKŁAD NA ZIMNO:

1. Napetnij opakowanie do pełna zimną/lodową wodą.
2. Obróć opakowanie do góry nogami aby zawór się uszczelnił. Usuń nadmiar wody który mógł pozostać przy zaworze.
3. Okład na zimno jest gotowy do użycia. Zaleca się lekkie rozmasowanie powierzchni opakowania w celu równomiernego rozłożenia się temperatury.

OSTRZEŻENIA / ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Jeżeli wewnętrzny zawór nie jest kompletnie pusty, niewielka ilość wody/żelu może wyciec. Okład może zostać rozerwany – zachowaj ostrożność podczas wyjmowania z kuchenki mikrofalowej/inkubatora. Temperatura okładu może jeszcze rosnąć po zakończeniu podgrzewania. Ponieważ jest duże ryzyko stosowania okładu o temperaturze wyższej a niżeli 45 stopni Celsjusza znajdujący się na okładzie wskaźnik zmieni kolor na czerwony. Okład i znajdujący się w nim żel jest zbyt ciepły gdy wskaźnik zabarwi się na czerwono. Okład, który jest zbyt ciepły lub zbyt zimny może spowodować podrażnienia skóry i tkanki. Diabetycy i osób z problemami krążeniowymi powinni stosować terapię ciepłą dopiero po konsultacji z lekarzem. Pamiętaj, że skóra dzieci i osób w starszym wieku oraz kobiet w ciąży jest bardziej wrażliwa. Okład jest tylko do użytku zewnętrznego. Jeżeli okład jest uszkodzony należy go natychmiast wyrzucić.

ZALECENIA:

Każda kuchenka mikrofalowa pracuje inaczej dlatego sugerujemy aby okład podgrzewać w interwałach 20 sekundowych aż uzyska pożądaną temperaturę.

CURAPAX ZAWIERA:

PE, PA, PP i super chłonny polimer (SAP). CURAPAX nie zawiera PVC i lateksu. Żel, który się tworzy jest nietoksyczny, bez obawy o podrażnienie skóry i rozpuszcza się w stoniej wodzie. Może być utylizowany wraz ze zwykłymi odpadami. Nie spożywaj żelu. Skontaktuj się z lekarzem, w razie, gdy żel zostanie spożyty.