

# CURAPAX®

## INSTRUÇÕES AO USUÁRIO



Sempre leia as instruções antes de usar



Encha a bolsa com água



Vire a bolsa de ponta cabeça e agite delicadamente



Aqueça no forno microondas



Se o indicador estiver vermelho, a bolsa pode estar muito quente para ser usada

### BOLSA QUENTE:

1. Encha completamente a bolsa com água fria/morna.
2. Vire a bolsa de cabeça para baixo para selar a válvula de entrada. Remova o excesso de água da válvula.
3. Aqueça a bolsa no microondas ou incubadora até que a temperatura desejada seja alcançada.
4. As bolsas quentes estão prontas para uso. Você pode gentilmente massagear a bolsa para distribuir igualmente o gel aquecido.

### BOLSA FRIA:

1. Encha completamente a bolsa com água fria/morna.
2. Vire a bolsa de cabeça para baixo para selar a válvula de entrada. Remova o excesso de água da válvula.
3. Esfrie a bolsa em um refrigerador (de 1 a 2 horas) até que a temperatura desejada seja alcançada.
4. As bolsas frias estão prontas para uso. Você pode gentilmente massagear a bolsa para distribuir igualmente o gel frio.

### BOLSA QUENTE INSTANTÂNEA:

1. Encha completamente a bolsa com água quente da temperatura desejada.
2. Vire a bolsa de cabeça para baixo para selar a válvula de entrada. Remova o excesso de água da válvula.
3. A bolsa quente está pronta para uso. Você pode gentilmente massagear a bolsa para distribuir igualmente o gel aquecido.

### BOLSA FRIA INSTANTÂNEA:

1. Encha completamente a bolsa com água fria ou bem gelada.
2. Vire a bolsa de cabeça para baixo para selar a válvula de entrada. Remova o excesso de água da válvula.
3. A bolsa fria está pronta para uso. Você pode gentilmente massagear a bolsa para distribuir igualmente o gel frio.

### PRECAUÇÕES:

Se a válvula de entrada não estiver completamente vazia, uma pequena quantidade de água /gel pode vazar. Uma bolsa superaquecida pode estourar - tome cuidado quando remover a bolsa do microondas/incubadora. A temperatura da bolsa pode continuar a aumentar levemente após o aquecimento ser encerrado. Como existe um maior risco de usar este produto quando a temperatura alcança 45 graus Celsius, o indicador de aquecimento fica vermelho. O indicador de aquecimento é somente um indicador extra de precaução contra danos de uso. A bolsa e o gel também podem estar muito quentes para o uso desejado - mesmo se o indicador de aquecimento não estiver vermelho. Sempre manuseie a bolsa com precaução. Uma bolsa que estiver muito quente ou muito gelada pode resultar em danos na pele e no tecido subjacente. Tome cuidado especial quando utilizar em pacientes com sensibilidade reduzida. Pessoas que sofrem de diabetes e pessoas com má circulação devem usar a terapia de calor apenas após consultar um médico. Esteja ciente de que a pele de crianças, idosos e mulheres grávidas podem ser especialmente sensíveis, por isso a supervisão é aconselhada. A bolsa é de uso externo SOMENTE. Se a bolsa estiver danificada, deve ser jogada no lixo imediatamente.

### RECOMENDAÇÃO:

Cada microondas atua de maneira diferente. Portanto, recomendamos que você aqueça o CURAPAX em intervalos de, por exemplo, 20 segundos, até que você tenha um senso mais preciso de quando o produto alcança a temperatura desejada em seu próprio microondas.

### CURAPAX® CONTEM:

PE, PA, PP e super absorvente polímero (SAP). CURAPAX é livre de PVC e latex. O gel que é criado não é tóxico, livre de riscos para a pele e pode ser dissolvido em água com sal. Evite a ingestão do gel. Contate um médico caso o gel seja ingerido. CURAPAX® é um produto não tóxico, descartável que pode ser jogado em lixo comum caseiro.